

Calidad en imágenes de mamografía para desafiados ambientes de procesamiento

La película para mamografía Kodak Min-R S fue diseñada para funcionar de manera óptima en situaciones complicadas de procesamiento, como el procesamiento manual, procesadoras con tanques de poca profundidad y entornos que sirven a múltiples aplicaciones. Esta película ortocromática, sensible al verde y de alto contraste se caracteriza por brindar unas condiciones de procesamiento estables incluso en ambientes no óptimos. El resultado, una calidad de imagen mamográfica confiable.

Adecuada para su entorno

En la mayoría de los casos, la película Kodak Min-R S no necesita ajustes adicionales para adecuarse al equipo o a los procedimientos empleados. Compatible con todas las pantallas Kodak Min-R, esta película:

- Proporciona un sistema de velocidad 100 utilizada con las pantallas Min-R y una velocidad 150 con las pantallas Min-R 2000;
- Garantiza resultados buenos y constantes en equipos de procesamiento compartidos y con tanques de poca profundidad;
- Es compatible con el revelador y fijador Kodak GBX para procesados manuales y mantiene la densidad necesaria para obtener imágenes aceptables;
- Puede utilizarse con pantallas para mamografía ortocromáticas de otros fabricantes;
- Ofrece resultados óptimos al utilizarse dentro del sistema Kodak completo (soluciones de procesamiento, pantallas, cassettes y procesadoras).

Buena percepción del detalle

Una imagen nítida mejora la visualización y garantiza mejor información diagnóstica. La alta resolución que rinde esta película mejora la percepción de las microcalcificaciones y otros detalles de diminuto tamaño.



Diseño innovador

La película Kodak Min-R S es una innovadora película de doble emulsión diseñada para utilizarse con una única pantalla intensificadora. La tecnología propia empleada, diseñada por Kodak, utiliza dos emulsiones finas que trabajan conjuntamente para generar una imagen de gran calidad — al tiempo que ofrece una tolerancia de procesamiento mayor que la que puede proporcionar una única emulsión más gruesa.

- La emulsión principal reproduce el tejido parénquima del seno con detalle y contraste.
- La emulsión secundaria reproduce el tejido periférico del seno y las densidades superiores.

Una marca en la que puede confiarse

Kodak es el líder mundial en imágenes para mamografía por su dedicación en este campo y por su compromiso de satisfacer al cliente. Kodak combina tecnologías de punta con los químicos y el equipamiento de procesamiento más adecuado para garantizar unas imágenes médicas capaces de asegurar un cuidado al paciente de alta calidad. Seguimos luchando por atender sus necesidades exigentes, definiendo nuevos estándares en calidad de imagen, productividad y reconocimiento.


DIVISIÓN IMÁGENES PARA LA SALUD

UNA MEJOR VISIÓN DE VIDA.



PELÍCULA PARA MAMOGRAFÍA KODAK MIN-R S

Tecnología de doble emulsión

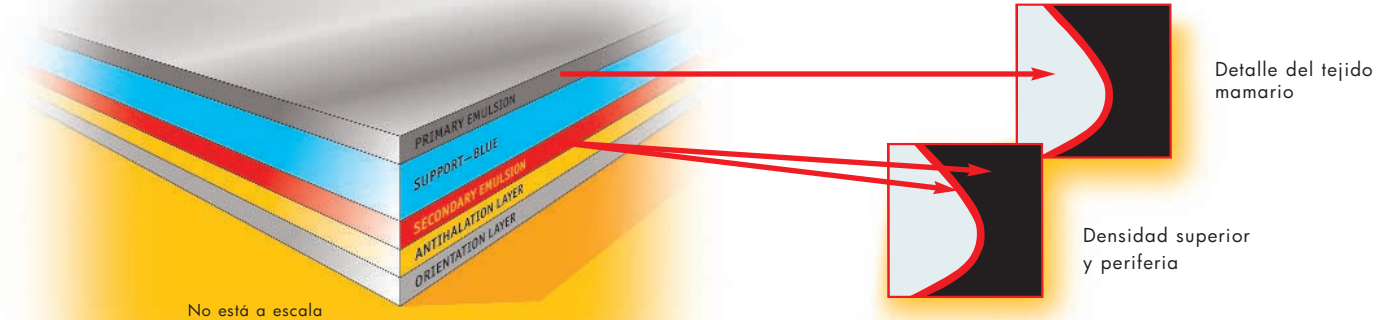

Información para colocar pedidos

PRODUCTOS

N.º CATÁLOGO

Película Kodak Min-R S 24 x 30 cm **874 4948**
 Película Kodak Min-R S 18 x 24 cm **193 1674**

Cassette Kodak Min-R 2 con:

Pantalla Kodak Min-R 2000 de 24 x 30 cm 899 9492
 Pantalla Kodak Min-R 2000 de 18 x 24 cm 810 4101
 Pantalla Kodak Min-R 2190 de 24 x 30 cm 891 0853
 Pantalla Kodak Min-R 2190 de 18 x 24 cm 126 0579
 Pantalla Kodak Min-R de 24 x 30 cm 709 1614
 Pantalla Kodak Min-R de 18 x 24 cm 708 7984

Cassette Kodak Min-R con:

Pantalla Kodak Min-R 2000 de 24 x 30 cm 193 0247
 Pantalla Kodak Min-R 2000 de 18 x 24 cm 878 4449
 Pantalla Kodak Min-R 2190 de 24 x 30 cm 874 3171
 Pantalla Kodak Min-R 2190 de 18 x 24 cm 865 0426
 Pantalla Kodak Min-R de 24 x 30 cm 128 4413
 Pantalla Kodak Min-R de 18 x 24 cm 128 4397

Características pantalla-película

PANTALLA Kodak	PELÍCULA Kodak	Ciclo de procesado relativo	Velocidad relativa	Contraste		D-Max
				RP	EXII	
MIN-R 2000	MIN-R S	Estándar	150	3.40	3.60	> 4.0
MIN-R 2190	MIN-R	Estándar	190	3.40	3.60	> 4.0
MIN-R	MIN-R S	Estándar	100	3.40	3.60	> 4.0

Parte de un sistema inigualable

Utilice el sistema de película Min-R S con químicos Kodak para procesado y con equipos Kodak para mamografía; logrará mantener en sus instalaciones los más altos estándares de funcionamiento y cuidado del paciente.

Más información

Para obtener más información acerca de la película para mamografía Kodak Min-R S, o para realizar un pedido, póngase en contacto con su representante de Kodak o con su distribuidor autorizado de productos Kodak.

División Imágenes para la Salud
 Región Latinoamericana
 EASTMAN KODAK COMPANY
 Miami, FL 33126

Teléfonos locales en
 Argentina: 54 3327 458000
 Chile: 562 530 8000
 Colombia: 571 412 5550
 Rep. Dominicana: 809 563 1262
 México: 52 55 5599 1760
 Panamá: 507 263 6077
 Perú: 511 610 8700
 Puerto Rico: 787 757 5500
 Venezuela: 582 12 707 1111
 Resto del Caribe y
 C. América: 305 507 5600

www.kodak.com/go/mammo

KODAK: LÍDER MUNDIAL EN IMÁGENES PARA MAMOGRAFÍA

